

Bruksanvisning

Streamer Pro 1.3A

ConnectLine



Made for
Apple iPhone | iPad | iPod



oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion till denna bruksanvisning

Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya Streamer. Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive avsnittet Varningar. Detta kommer att hjälpa dig att få full nytta av din nya Streamer.

Om du har ytterligare frågor kring hanteringen av din Streamer, bör du kontakta din audionom.

Streamern ansluter olika ljudkällor till dina hörapparater så att de fungerar som ett trådlöst headset. Streamern överför ljudet till båda hörapparaterna vilket ger en bättre ljudupplevelsen.

Se en komplett systembeskrivning online här: www.oticon.global/connectline. Här finns det även interaktiva presentationer, instruktionsfilmer och en hjälpsektion med vanliga frågor och svar.

Avsedd användning

Streamer Pro 1.3A är avsedd för användare av trådlösa hörapparater. Produkten används tillsammans med användarens hörapparater. Streamern fungerar som en centralenhet i kommunikationen mellan hörapparater och andra enheter som mobiltelefon. Streamer kan anslutas till många olika externa ljudkällor så att du till exempel kan höra TV: n eller föra samtal via din mobiltelefon.

Streamer fungerar som en fjärrkontroll där du kan justera hörapparaternas volym och byta program.

Streamer är inte avsedd att användas av spädbarn/barn under 36 månaders ålder.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att den elektroniska enheten är specifikt konstruerad för att kopplas par med en iPod, iPhone eller iPad, och att den har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestationsstandarder. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess efterlevnad av säkerhets- och regelverksstandarder. Tänk på att om denna enhet används tillsammans med en iPod, iPhone eller iPad, kan detta påverka den trådlösa prestandan.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Android-roboten reproduceras eller modifieras till resultat av arbete som skapats och delats av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution license.

Innehåll

Förpackningens innehåll	8
Översikt av Streamer	11

Grundläggande funktioner - första användningen

Bära Streamer i halsbandet	12
Använda Streamer utan halsband	14
Sätta på och stänga av Streamer	16
Ladda Streamer	18
Indikator för svagt batteri	20
Fjärrkontroll för hörapparater	24
Parkoppla Streamer med en mobiltelefon och andra enheter	26
Rensa parkoppling	28

Primära funktioner

Anslutning/ljudöverföring	32
Mobiltelefon	33

Fortsättning på nästa sida

ConnectLine telefonadapter	40
ConnectLine mikrofon	42
ConnectLine TV-adapter	44

Sekundära funktioner

ConnectLine App	46
Anslutning/streaming	47
Ljudsladd	48
Ljudsladd för headset	50
Musik/ljud trådlöst	52
PC-headset - trådlöst	54
Telespole (inbyggd)	56
FM-mottagare (tillval)	58

Övrig information

Rengöring och skötsel	61
Tillbehör och reservdelar	62
Varningar	64
Teknisk information	68
Internationell garanti	72

Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller följande artiklar:



Streamer



Halsband - medium (sidan 12)



Halsband - långt (sidan 12)

Låda 1



Laddare (sidan 18)

*Strömförsörjning varierar
från land till land.*

Låda 3



Skyddshölje (sidan 62)

Låda 2

USB-kabel
för laddning
(sidan 18)



3.5 mm minite-
le-sladd för MP3/
musik (sidan 48)

3,5 mm
headset- sladd för
telefoni via dator
(sidan 50)




Denna bruksanvisning



VIKTIGT!

Se bruksanvisningen för din hörapparats specifika funktioner.

Översikt Streamer

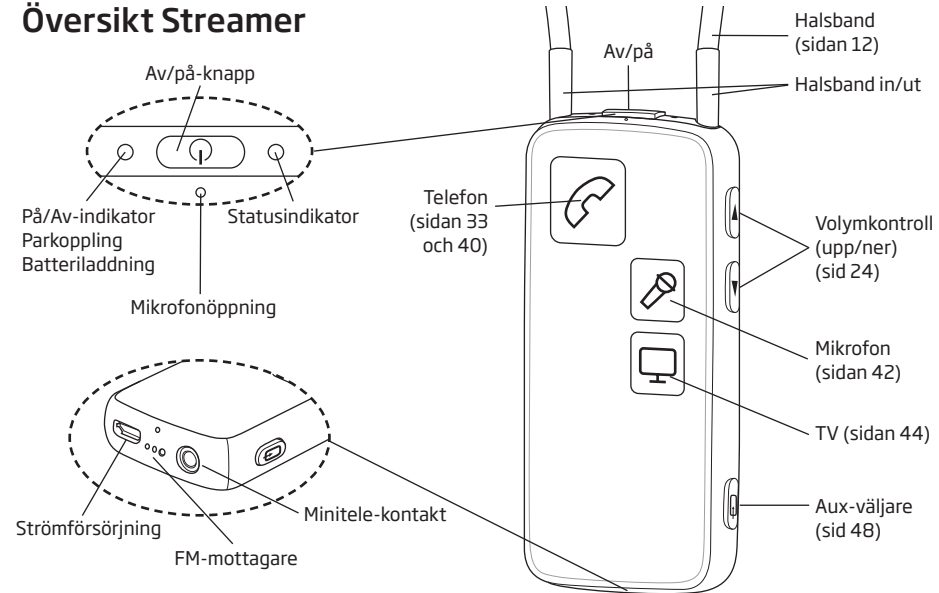

Grundläggande funktioner - första användningen

Bära Streamer i halsbandet

Halsbandet är en integrerad del av Streamers elektroniska system. Det fungerar som en antenn som överför ljud till dina hörapparater.

För bästa möjliga ljudkvalitet och längsta möjliga drifttid, ska Streamer alltid användas tillsammans med de medföljande halsbanden. Streamer levereras med två halsband, ett långt och ett medium.



VIKTIGT!

Var försiktig när du använder halsbandet. Av säkerhetsskäl (för att undvika strypning) lossnar halsbandet automatiskt om den fastnar i något. Halsbandet får inte förkortas eller ändras på något sätt, t.ex. med en knut. Om halsbandet går sönder kan det inte repareras utan måste ersättas med ett nytt. Rådgör med din audionom om ersättningshalsband.

Montera halsbandet

Halsbandet trycks fast i hålen upptill på Streamer.


När du pratar med någon via Streamer, måste din röst kunna fångas upp av den inbyggda mikrofonen.

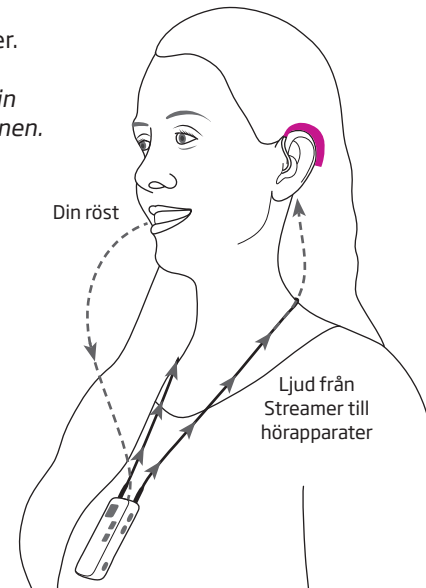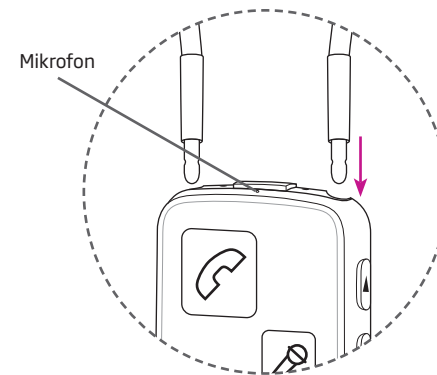

Använda Streamer utan halsband

Om du använder Streamer utan halsbandet måste avståndet till hörapparaterna vara mindre än en meter. Detta kan leda till ljudavbrott och därför rekommenderar vi att du alltid använder halsbandet..

Om du använder Streamer utan halsbandet ökar strömförbrukningen och den maximala driftstiden minskar till fem timmar, vid full laddning.

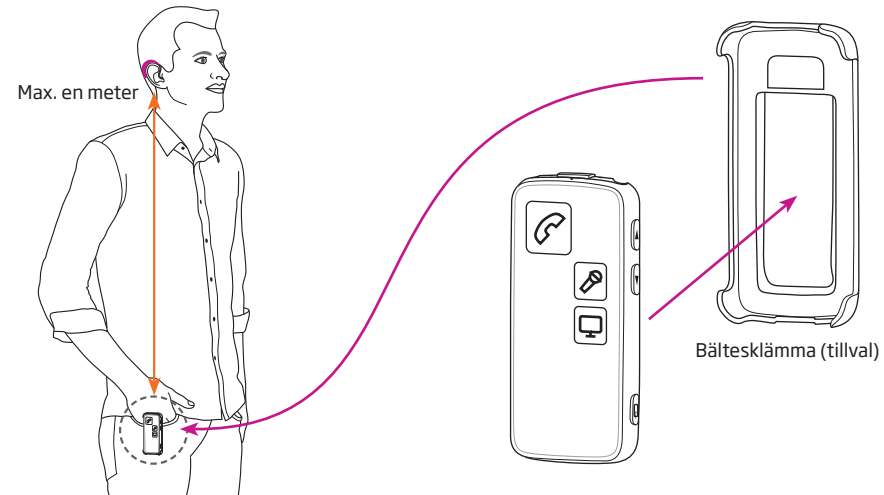

Sätta på och stänga av Streamer

Sätta på

Tryck på av/på-knappen upptill på Streamer i cirka två sekunder tills alla lampor fram och upptill blinkar vilket betyder att enheten är påsatt.


Släpp av/på-knappen. Nu ska strömindikatorn upptill på Streamer lysa grön.

Om det inte går att sätta på Streamer, kontrollera att den är laddad (sidan 18).

Du kan kontrollera status genom att trycka kort på av/på-knappen.

Stänga av

Tryck in av/på-knappen i cirka två sekunder tills den gröna strömindikatorn slocknar.

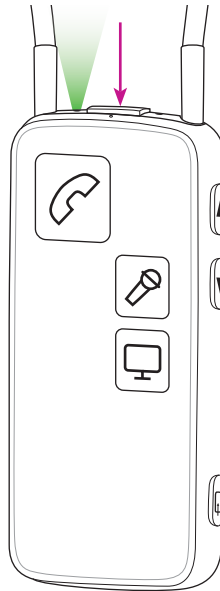

Ström på/av		
Status	Framsida	Beskrivning
	 	Streamer är avstängd
	 	När du trycker på av/på-knappen i cirka två sekunder, tänds alla lampor i några sekunder för att indikera att Streamer är påslagen
	 	Streamer är påslagen och klar att användas


Ladda Streamer

Streamer har ett laddningsbart batteri. Vi rekommenderar att du laddar Streamer en gång per dag för bästa prestanda.

Sätt in laddarens kontakt i mini-USB-uttaget i Streamerns undersida (A). Kom ihåg att ansluta laddaren till ett eluttag.

Laddningen indikeras av en blinkande grön indikator upptill. När Streamer är fulladdad lyser indikatorn med ett fast grönt sken.

När enheten är avstängd indikeras laddningen av en blinkande grön indikator upptill. När enheten är fulladdad slocknar LED-indikatorn.

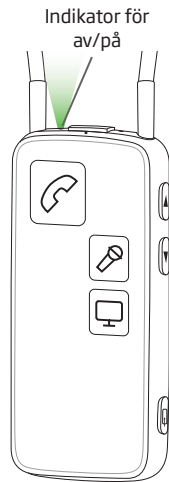


VIKTIGT!

Ladda din Streamer med den CE- och säkerhetsmärkta medföljande laddaren med strömförsörjning 5.0V/1A.  

Laddning		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Laddar - avstängd - statusindikatorn blinkar med grönt ljus
 		Laddar - påslagen (eller används) - statusindikatorn växlar mellan starkt och svagt grönt

 Blinkar  Bleknar

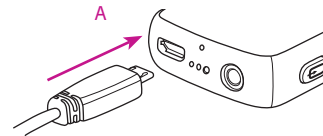


VIKTIGT!

Under laddning ska på/av-indikatorerna tändas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Om på/av-indikatorern inte tänds ska du ta bort Streamer från laddaren och kontakta din audionom.

Indikator för svagt batteri

Streamer indikerar **svagt batteri** (cirka 20 minuters användningstid kvar) med fast rött sken, och indikerar mycket svagt batteri (cirka fem minuters användningstid kvar) med ett blinkande rött sken.

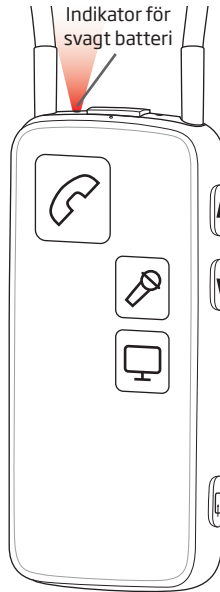

Indikator för svagt batteri		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Svagt batteri - cirka 20 minuters användningstid kvar vid ljudöverföring till hörapparater
 		Mycket svagt batteri - cirka fem minuters vid användning ljudöverföring till hörapparater

 Fast sken  Avtar

VIKTIGT!

Batteriet bör inte ladda ur helt. Svagt batteri - cirka 20 minuters användningstid kvar vid användning tillsammans med hörapparater. Du kan inte byta batteri själv.

Batterikapacitet och laddningstid	
Batterikapacitet med halsband	Upp till tio timmar normal användning: Två timmar telefon-tid, sex timmar TV-tid och två timmar i viloläget.
Batterikapacitet utan halsband	Upp till fem timmars normal användning: En timmes telefontid, tre timmars TV-tid och en timmes standby.
Batteri laddningstid	Två timmar för full laddning med den medföljande laddaren.
Fjärrkontroll	När Streamer är avstängd fungerar fjärrkontrollen i upp till sex månader på en full laddning.
Förväntad batterilivstid	Batteriet i Streamer räcker i mer än två år om det laddas upp dagligen. Din audionom kan byta batteri åt dig.

Fjärrkontroll för hörapparater

Volym upp/ner

Tryck kort på volym upp eller ner för att justera hörapparaternas volym. Du hör klick-ljud i hörapparaterna.

Byta program i hörapparaterna


Du kan byta program genom att **ändra volymen upp eller ner** i mer än en sekund. När du byter program indikeras detta med ett ljud i dina hörapparater.

Aktivera Tyst läge

Aktivera tyst läge i hörapparaterna genom att **trycka på volym upp OCH ner samtidigt i en sekund**.

VIKTIGT!

- Funktionen Tyst läge finns bara i senare hörapparat-modeller från Oticon. Tala med din audionom för mer information.
- Även om Streamer är avstängd kan den användas som fjärrkontroll till hörapparaterna.

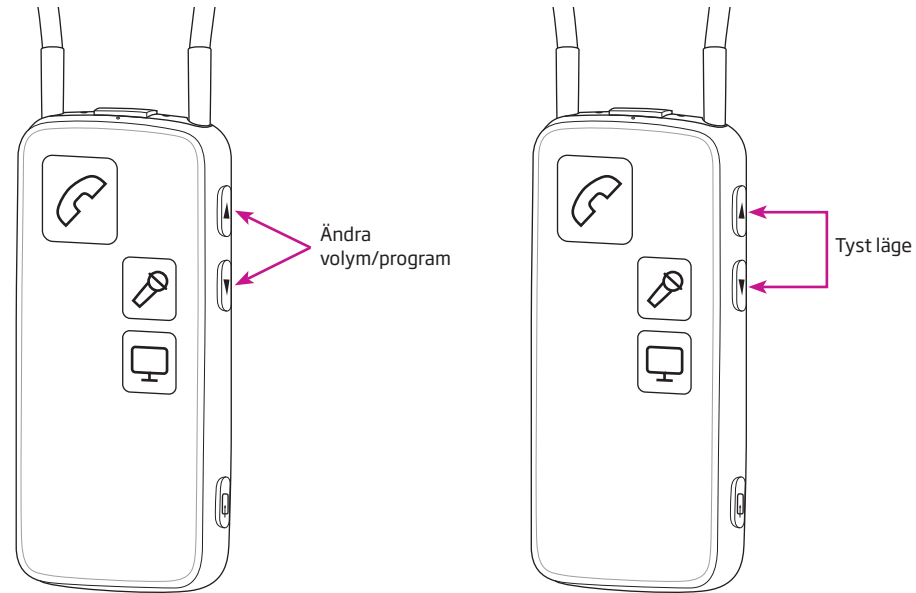


Parkoppla Streamer med en mobiltelefon och andra enheter

Innan du kan använda Streamer tillsammans med andra enheter som t.ex. mobiltelefoner, måste enheterna parkopplas.

1. Parkoppla Streamer

Tryck in av/på-knappen i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar blått.

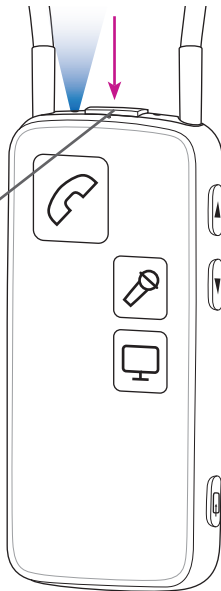


2. Aktivera parkoppling för den andra enheten (t.ex. en mobiltelefon).

Se inställningar i din mobiltelefon.
Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen till mobiltelefonen vid parkoppling.

3. Den andra enheten (mobiltelefonen) kräver ofta en PIN-kod.


PIN-koden för Streamer är 0 0 0 0 (fyra nollor).

4. Efter slutförd parkoppling visar mobiltelefonen ofta en hörlurssymbol. Samtidigt lyser Bluetooth-indikator på Streamer med ett fast blått sken.

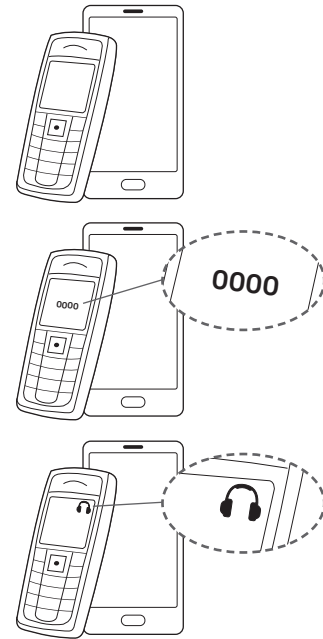

Rensa parkoppling

Om du har problem med parkopplingen, kan du ta bort alla parkopplingar genom att samtidigt trycka på strömbrytaren och volym upp-knappen i tre sekunder.

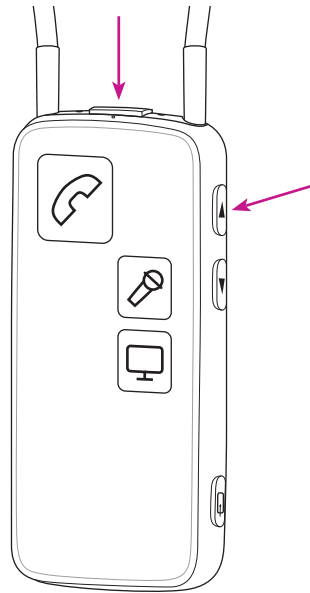

Parkoppling		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Streamer i parkopplingsläge
 		Parkoppling klar
 		Streamer på

 Fast sken  Blinkar

Statisk elektricitet

Om streamern utsätts för elektrostatisk urladdning, d.v.s. statisk elektricitet, kan ljudöverföringen avbrytas. Som standardinställning startar Streamern om och du kan aktivera överföringen igen.


För mer information om specifika överföringsanslutningar, se avsnittet Primärfunktioner (sidan 32) eller Sekundära funktioner (sidan 46) i denna bruksanvisning.

Primära funktioner

Anslutning/ljudöverföring

ConnectLine Streamers användargränssnitt är inställt och optimerat för vardagsanvändning i följande situationer:

1. Användning av mobiltelefon via Bluetooth* (sidan 33).
Användning av ConnectLine telefonadapter (säljs separat) med fast telefonlinje* (sidan 40).
2. Användning av ConnectLine-mikrofon (säljs separat), som underlättar samtal på avstånd eller i bullriga miljöer (sidan 42).
3. Användning av ConnectLines TV-lösning (säljs separat) för trådlös överföring av TV-ljud till dina hörapparater* (sidan 44).

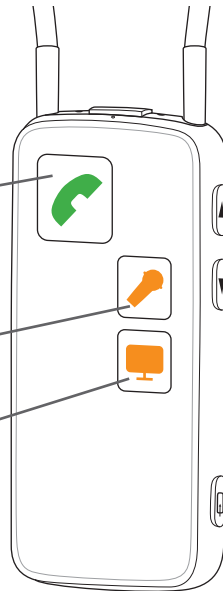

*Streamer tillsammans med hörapparaterna blir ett trådlöst headset

Mobiltelefon

För att ta emot eller ringa samtal när du använder Streamer, kontrollera att Streamer och mobiltelefon är parkopplade (sidorna 26-27), att enheterna är påslagna och inom räckvidden (tio meter). Din mobiltelefon indikerar ofta att den är ansluten till Streamer med en hörlursymbol på mobiltelefonens display.




Besvara samtal

Se till att du talar in i Streamers mikrofon.

När din fasta telefon ringer, hör du en signal i dina hörapparater. Samtidigt blinkar telefonknappen och statusindikatorn på Streamer grönt.

Tryck kort på telefonknappen på Streamer för att ta samtalet. Du kommer då att höra ett kort pip i hörapparaterna. Nu lyser telefonknappen och statusindikatorn med ett fast grönt sken.

Du avslutar samtalet genom att åter trycka kort på telefonknappen.

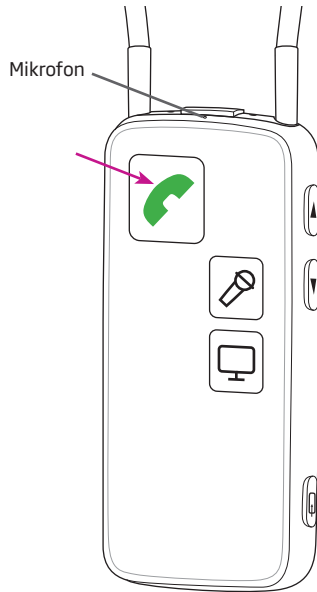

Besvara samtal		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Telefonindikator och statusindikator blinkar grönt. Du hör en signal för inkommande samtal i dina hörapparater
  		När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att samtalet besvarats - nu kan du tala med personen i den andra änden

 Fast sken  Blinkar


Ringa samtal

Se till att du talar in i Streamers mikrofon.

För att ringa ett samtal använder du mobiltelefonen. Du behöver inte göra något med Streamer. Slå **numret som vanligt** - samtalet kopplas sedan automatiskt till Streamer.

Telefonknappen på Streamer och statusindikatorn blir gröna och du hör ett kort pip som bekräftelse i dina hörapparater, som indikerar att samtalet nu är anslutet via Streamer och hörapparaterna.

Du avslutar samtalet genom att kort trycka på knappen "avsluta samtal" på telefonen eller telefonknappen på Streamer.

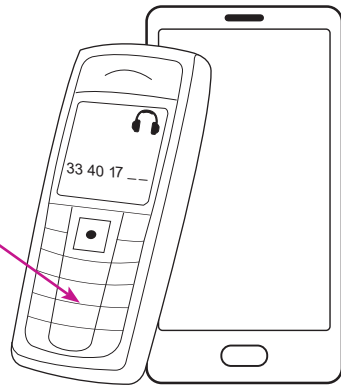

Ringa samtal		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att samtalet besvarats - nu kan du tala med personen i den andra änden

 Fast sken  Blinkar

Personliga inställningar av mobiltelefonfunktioner

Följande mobiltelefonfunktioner kan aktiveras eller avaktiveras av din audionom.

Avvisa samtal - på som standard

Du kan avvisa inkommande samtal genom att trycka kort på volymknappen Streamer.

Röstuppringning - på som standard

Tryck kort på telefonknappen för att aktivera röstuppringning (om detta stöds av din mobiltelefon och du inte befinner dig inom räckvidden för en ConnectLine-telefonadapter).

Återuppringning av senaste numret - på som standard

Tryck och håll in telefonknappen för att ringa upp det senast slagna numret (om detta stöds av din mobiltelefon).

Överföra samtal - på som standard

Tryck och håll in telefonknappen för att hänvisa ett samtal tillbaka till mobiltelefonen.

Alla framknappar besvarar samtal - på som standard

Vid inaktivering kan du bara besvara samtal med telefonknappen på Streamer.


Aktivera inkommande anslutningar (A2DP) - av som standard

Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en iPod, dator eller mobiltelefon aktivera/starta streaming av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från en parkopplad och ansluten dator.

ConnectLines telefonadapter


Streamer kan även användas med en vanlig fast telefon med hjälp av ConnectLine telefonadapter, som säljs separat.

För mer information om hur du använder ConnectLine TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer ConnectLine.

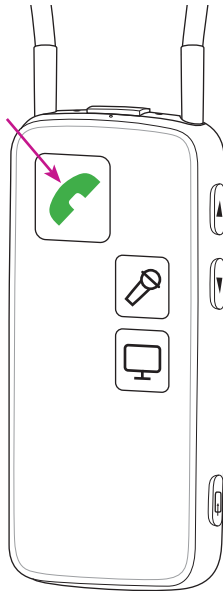

Prata i telefon		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Streamer ansluten - du kan tala med personen i den andra änden


 Fast sken

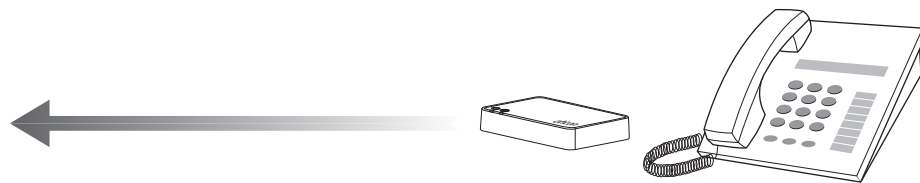

ConnectLine mikrofon


ConnectLine-mikrofon kan beställas som tillbehör. Tal från personer som bär mikrofonen överförs via Streamern till personen som bär Oticon hörapparater.

För mer information om hur du använder ConnectLine mikrofonen, se bruksanvisningen som medföljer ConnectLine mikrofonen.

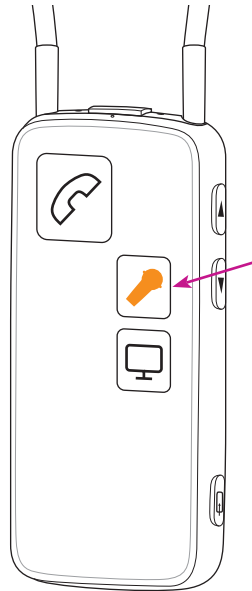

Ljud från ConnectLine mikrofon		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		När mikrofonen är ansluten överförs ljud från mikrofonen till hörapparaterna

  Fast sken

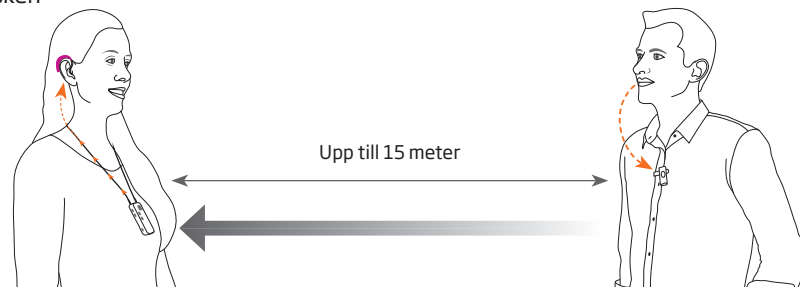

ConnectLines TV-adapter


ConnectLine TV-adapter säljs separat. Den överför ljud från TV:n via Streamer till dina hörapparater .

För mer information om hur du använder ConnectLine TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer ConnectLine.



Titta på TV		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Streamer påslagen och redo
 		Ansluta till TV
 		Streamer ansluten - ljud från TV:n hörs i hörapparaterna

  Fast sken   Blinkar

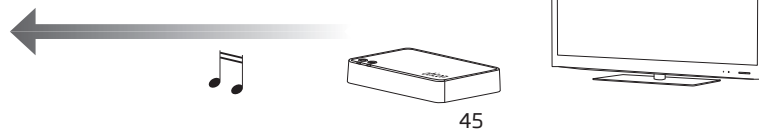

Sekundära funktioner

ConnectLine App

Appen för iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android™-enheter erbjuder ett intuitivt och diskret sätt att styra hörapparaten och ConnectLine-systemet. Den erbjuder också möjligheten att anpassa funktionerna i ConnectLine-systemet.

Kan hämtas på App Store® och på Google Play™.




Vänligen gå till oticon.global/support för mer information om kompatibilitet.



Anslutning/streaming

Streamer kan användas med många olika ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, datorer osv.

Följande prioriteringar gäller.

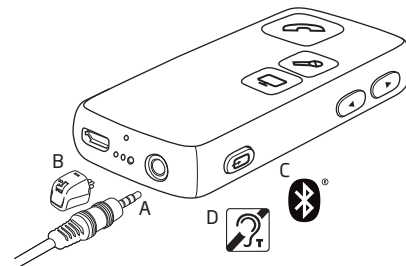


A	Prioritet 1	3,5 mm minitele in/ut (om anslutet)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 48
B	Prioritet 2	FM (om anslutet)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 58
C	Prioritet 3	Trådlöst Bluetooth (inbyggt)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 52
D	Prioritet 4	Slingmottagare (inbyggd)	Tryck och håll in AUX-väljaren i cirka två sekunder	Sidan 56

Ljudsladd


Sätt i och anslut den medföljande minitele-sladden så kan du lyssna på musik från många olika ljudkällor.

När du vill höra ljud från en enhet trycker du bara kort på **AUX-knappen**. När ljudsladden är ansluten startar överföringen av ljudet direkt.

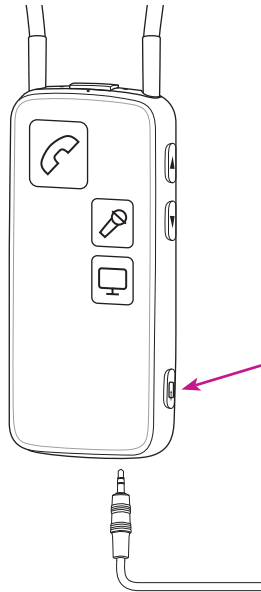

Musik-/ljudsladd		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Du hör ett kort pip följt av ljudet från enheten

  Fast sken

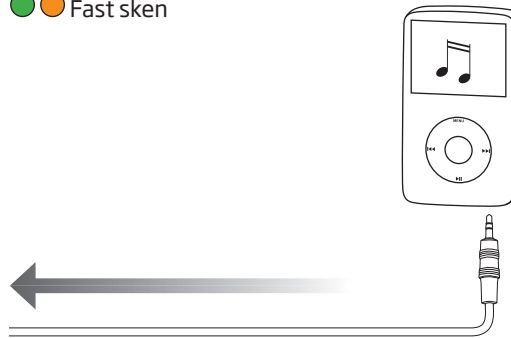


Ljudsladd för headset

Se till att du talar in i Streamers mikrofon.


Sätt in och anslut den medföljande minitele-sladden och minitele-sladden för telefoni så kan du använda Streamer som ett headset tillsammans med din dator.

Du använder headset-funktionen genom att **trycka kort på AUX-knappen**.

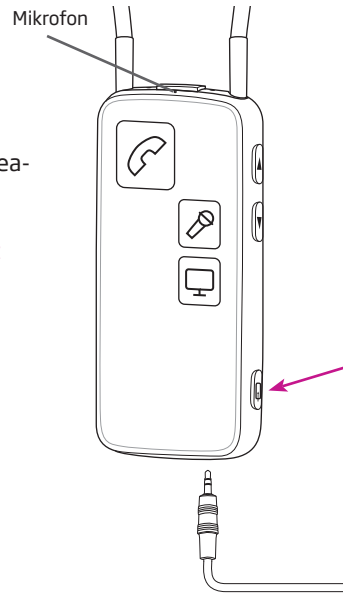

Ljudsladd för headset		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Du hör ett kort pip - nu kan du höra och tala med personen i den andra änden

  Fast sken

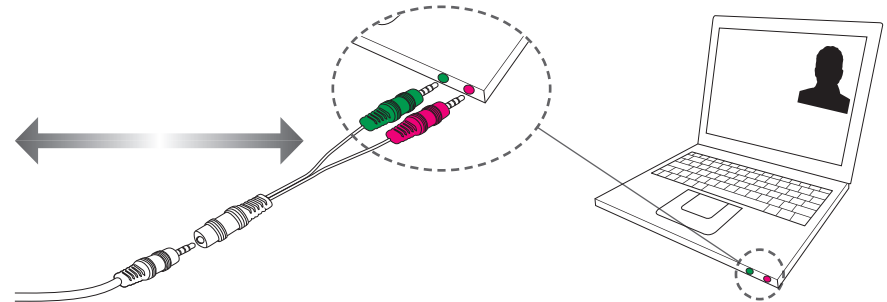


Musik/ljud trådlöst

För att lyssna på musik/ljud trådlöst, t.ex. från en MP3-spelare eller en dator med inbyggt Bluetooth, kontrollera att enheten har parkopplats med Streamer (sidan 26), att båda enheter är påslagna och inom räckvidd (<10 meter).

Lyssna på musik, t.ex. Från en mobiltelefon, genom att trycka på AUX-knappen innan du startar musikspelaren.

Aktivera automatiska anslutningar - av som standard

Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en iPod, dator eller mobiltelefon aktivera/starta streaming av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från en parkopplad och ansluten mobiltelefon.

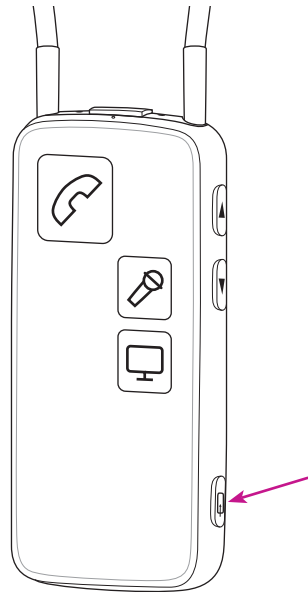

Musik/ljud - trådlöst		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Streamer ansluter till musik/ljudenhet
  		När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet från FM-sändaren

  Fast sken  Blinkar



PC-headset - trådlöst

Se till att du kan tala in i Streamers mikrofon.


Vid parkoppling med en dator, kontrollera att Streamer parkopplas som ett headset.

För användning av headsetfunktionen görs samtalsstyrningen från datorn.



Headset - trådlöst		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Streamer ansluter till musik/ljudenhet
  		När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet från FM-sändaren

  Fast sken  Blinkar

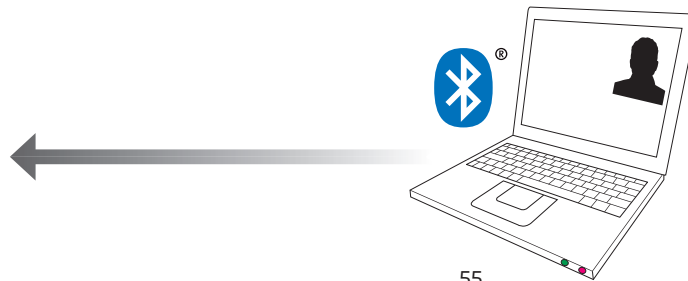


Telespole (inbyggd)

Streamer har en inbyggd slingmottagare (telespole).

Du tar emot ljud via slingmottagaren genom att trycka in AUX-knappen i cirka två sekunder.

Obs! Vid behov kan funktionen ändras så att telespolen aktiveras med en kort knapptryckning.

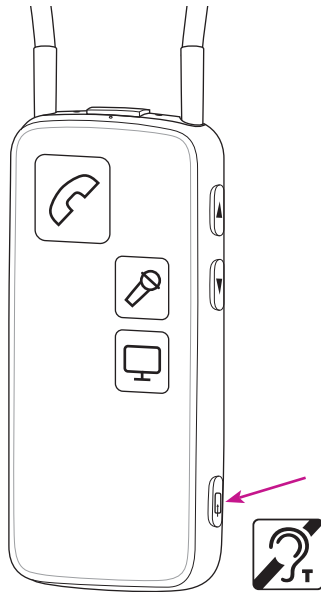

Telespole		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Efter anslutning hör du ett kort pip följt av ljudet från telespolen

  Stadig

FM-mottagare (tillval)

En FM-mottagare kan anslutas till euro-stiftuttaget. Mottagaren tar emot FM-signaler från en FM-sändare, som vanligtvis bärs av en lärare.

Anslut FM-mottagaren och tryck kort på AUX-väljaren. När FM-sändaren och mottagaren är synkroniserade på samma kanal, tas FM-signalen emot i hörapparaterna.

Om FM-mottagaren har en lägesbrytare, för den till läget 00.



FM		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo. FM är aktiverat och redo för synkronisering med FM-sändare
  		När anslutningen är klar hör du ett kort pip följt av ljudet från FM-sändaren

  Fast sken

VIKTIG INFORMATION

Kontrollera att Streamer är påslagen men att den inte strömmar ljud till hörapparaterna när FM-kanalsynkronisering behövs.

Övrig information

Rengöring och skötsel

Streamer är en integrerad enhet som endast kräver minimal skötsel. Torka av smuts, fukt och fett med en mjuk och torr trasa. Du bör rengöra Streamer regelbundet. Mikrofonöppningen och kontakter för ljudanslutning, halsband och laddare måste hållas fria från smuts och främmande partiklar.

VIKTIG INFORMATION

Torka av Streamer med en mjuk, torr trasa. Streamer och halsband får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Tillbehör och reservdelar

Skyddshölje

Du kan be om extra skyddshöljen, mörk- eller ljusgrå, från din audionom.




Skyddshölje - med tryckknapp

Skyddshölje, mörk- eller ljusgrått, med en utstickande tryckknapp för lättare användning kan beställas hos din audionom.



Extra halsband

Extra halsband, svarta eller vita, finns i tre storlekar: Kort (51 cm), medium (66 cm) och lång (81 cm) och kan beställas från din audionom.

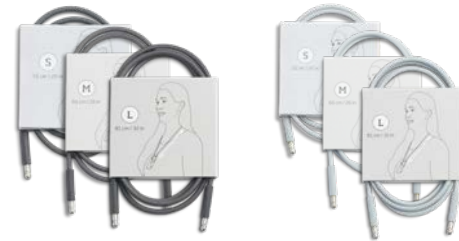

Bältesklämma

Du kan köpa en bältesklämma, svart eller vit, hos din audionom.



Varningar

Du bör sätta dig in i följande allmänna varningar och hela innehållet i den här bruksanvisningen innan du använder din ConnectClip för att säkerställa en korrekt användning och din personliga säkerhet. Prata med din audionom om din Streamer inte fungerar som förväntat.

Anslutning till extern utrustning

Eventuella risker vid användning av Streamer med extern utrustning ansluten med en aux-inmatningskabel avgörs av den externa signalkällan. När den är ansluten till extern utrustning som anslutits till ett vägguttag, måste denna utrustning efterleva IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 till 20 juni 2019) eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Uppladdningsbart batteri

Försök inte att öppna Streamer. Det kan skada batteriet

Försök aldrig att byta ut batteriet. Om batteriet måste bytas ut, ska du returnera din enhet till leverantören. Garantin upphör att gälla om det finns tecken på otillbörligt intrång i batterifacket.

Säkerheten för uppladdning av batterier med USB-sladden avgörs av den externa utrustningen. När den är ansluten till extern utrustning som anslutits till ett vägguttag, måste denna utrustning efterleva IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 till 20 juni 2019) eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Kvävningsrisk och risk att svälja batterier eller andra små delar

Streamer, dess delar samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

Om någon sväljer ett batteri eller en hörapparat, måste läkare uppsökas omedelbart.

Varningar

Korskontroll

Din Streamer ska förvaras utom räckhåll för barn eller andra som skulle kunna kontrollera dess funktioner, för att säkerställa din personliga säkerhet och undvika felaktig användning.

Använda Streamer med halsband

Om halsbandet skulle fastna i något medan du bär den, är det utformat så att det lossnar automatiskt. Försök därför aldrig korta ner eller modifiera halsbandet. Halsbandet ska inte användas till barn som väger mindre än 11 kg.

Värme och kemikalier

Streamer får aldrig utsättas för hög värme. Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen. Streamer får inte torkas i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada Streamer. Du ska alltid avlägsna Streamer innan du använder dessa produkter och se till att den hunnit torka innan användning.

Röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi och kirurgi

Avlägsna Streamer före röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi, kirurgi osv. eftersom den kan skadas av starka elektromagnetiska fält.

Aktiva implantat

Iaktta försiktighet om du har aktiva implantat. Du ska följa riktlinjerna som tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakes lämnar för användning tillsammans med mobiltelefoner och magneter, eftersom hörapparater och dess tillbehör i likhet med mobiltelefoner innehåller radiosändare.

Varningar

Eventuella biverkningar

Vanligtvis icke allergiframkallande material i Streamer kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta en läkare vid eventuella problem.

Användning i trafik

Användning av Streamer kan distrahera dig. Var medveten om din omgivning när du använder Streamer.

Följ den nationella lagstiftningen gällande användning av kommunikationsenheter i trafik.

Användning på flygplan

Din Streamer har Bluetooth. Använd inte Streamer ombord på flygplan, om inte flygplanspersonalen uttryckligen gett dig tillstånd.

Explosionsrisk

Strömkällan i din Streamer alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand vid normal användning. Streamer har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder Streamer i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Störningar

Streamer har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan Streamer och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstödlarm och andra trådlösa enheter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet mellan Streamer och den störande enheten.

Varningar

Mobiltelefoner, kompatibilitet

På www.oticon.se/connectline kan du finna de mobiltelefoner som testats av Oticon och som vid testtillfället uppfyllde kraven för kompatibilitet med ConnectLine. Oticon ansvarar dock inte generellt för sådan kompatibilitet. I synnerhet ansvarar inte Oticon för inkompatibilitet orsakad av framtida uppdateringar av mobiltelefonerna eller för inkompatibilitet med mobiltelefoner som inte ingått i dessa tester. Oticon har ingen ekonomisk ersättningsskyldighet för mobiltelefoner som inte fungerar som förväntat. Läs kompatibilitetslistan innan du köper en ny mobiltelefon.

Teknisk information

Modellnamn	Streamer Pro 1.3A
Hanteringsanvisning	
Driftsförhållanden	Temperatur: +10°C till +45°C Luftfuktighet: <85% relativ fuktighet Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Förvarings- och transportförhållanden	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Temperatur: -20° C till +60° C Luftfuktighet: <85% relativ fuktighet

Streamer innehåller en radiosändare som använder kortvågsteknik med magnetisk induktion vid 3,84 MHz. Sändarens magnetfält är mycket svagt och ligger alltid under 15 nW (vanligtvis under -15 dBuA/m på 10 meters avstånd).

Streamer har en radiosändare som använder Bluetooth 2.4 GHz. Radiosändaren är svag och alltid under 10mW, motsvarande 10 dBm i total utstrålad effekt.

Streamer följer internationella standarder gällande radiosändare, elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på Streamer återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Ytterligare information finner du i:
Technical Data Sheets (TD) på www.oticon.se.

USA och Kanada

Enheten innefattar en radiomodul med följande ID-nummer för certifiering.

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Obs:

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens) Användande har följande två förbehåll: (1) denna utrustning kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Obs:

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Denna digitala klass B-apparat efterlever Kanadas ICES-003.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital klass B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket.

Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar.

Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att man stänger av och slår på enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut enheten till ett annat nätuttag än det som mottagaren är anslutet till.
- Rådfråga tillverkaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Internationell garanti

Din Streamer har en begränsad internationell garanti från tillverkaren som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva enheten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, sladdar, strömenheter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt/olämpligt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror.

Service

Ta med din Streamer till din audionom vid behov. Hen kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Tillverkaren deklarerar att denna Streamer överensstämmer med standardkraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC. Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.



Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.se



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning	
	Varningar Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten används.
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, enligt definition i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
	CE-märkning Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
	Elavfall (WEEE) Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Som hörapparat-användare kan du även returnera elektroniskt avfall till din audionom för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Överensstämmelsemärkning (RCM) Enheten överensstämmer med kraven på elsäkerhet, EMC och radiospektrum för produkter som tillhandahålls i Australien och Nya Zeeland.
	Användning inomhus Indikerar att produkten får användas inomhus

	Dubbel isolering Indikerar att produktens strömförsörjning är dubbelisolerad. Detta innebär en mycket låg risk för första fel, dvs. första fel kan inte inträffa.
	Märkning Made for Apple Indikerar att enheten är kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.
	Bluetooth-loggan Registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. på alla platser där sådan användning kräver en licens.

Beskrivning av andra symboler som används på märkningen	
	Ska hållas torr Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.
	Försiktighet Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppsmaningar.
	Katalognummer Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicintekniska produkten.
	Serienummer Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av den medicintekniska produkten.
 (ex. 5.0V, 200mA)	Vägguttag för strömförsörjning Anger hur mycket ström skickas från uttaget till din elektriska apparat.
	Se bruksanvisning Indikerar behovet att konsultera en bruksanvisning.
	Japan TELEC-etikett och Japan JATE-etikett "R" indikerar märkning för certifierad radioutrustning. "T" indikerar att enheten kan anslutas till telefonnätet.

	Singapore IMDA-etikett Indikerar att enheten uppfyller de standarder och specifikationer som publiceras av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) och är kompatibel med de offentliga telekommunikationsnäten i Singapore och orsakar inte radiofrekvensinterferens med andra auktoriserade radiokommunikationsnät
---	--

Index

A

A2DP-enhet. *See* Musik, trådlöst
Aktivera "tyst läge" 24
Antenn 12
Återuppringning av senaste nummer 38
Avsluta samtal 36

B

Batteri 22
 Kapacitet 22
 Laddningstid 22
 Lite 20
 Livslängd 22
 Uppladdningsbar 18
Besvara samtal 34
Bluetooth 52
Byta program 24

C

ConnectLine
 Telefon 40
 TV 44

D

Dator
 Ljudsladd för headset 50
 Musik/ljudsladd 48
 Musik/ljud - trådlöst 52

F

Fast telefon 40
Fjärrkontroll 24
Flygplan, användning på 66
FM 58
FM-sko. *See* FM

H

Hänvisa samtal 39
Headset 9

Ljudsladd för telefoni 50

Mobiltelefon 33

Sladd 50

Trådlös 52, 54

Headset ljudsladd 50

Hörlurar. *See* Headset; *See* Headset

L

Laddning 18

Ljud. *See* musik

Ljud (musik) 48

 Lyssna på musik 48

 Sladd 48

 Trådlös 52

Ljudsladd 9

Ljudsladd för headset 50

Ljudsladd för telefoni 50

Lyssna på ljud 48

Lyssna på musik 48

M

Mikrofon 42

Minitele-sladd 48, 50

Mobiltelefon 33

MP3-spelare 52

Musik 52

 Lyssna på musik 48

 Sladd 48

 Trådlös 52

N

Neka samtal 38

P

På/av 16

Parkoppling 26

 Läge 26

 Ta bort 28

PC. *See* Dator

Personliga inställningar 38

PIN-kod 27
Prata i telefon 41

R

Rengöring 61
Reservdelar 62
Ringa samtal 36
Röstuppringning 38

S

Samtal
 Avsluta 34, 36
 Hänvisa 39
 Neka 38
 Ringa 36
 Svara 34
Skötsel 61
Skyddshölje 62
Statisk elektricitet 30, 31

T

Ta bort parkoppling 28
Teknisk information 68
Telefonadapter 40
Teleslinga 56
Telespole 56
Tillbehör 62
Trådlös 52, 54
TV 44
Tyst läge 24

U

Uppladdningsbart batteri 18
Utan halsband 14

V

Varningar 64, 65, 66, 67
Volym upp/ner 24

1716475E / 2019.05.15



0000171647000001

oticon
PEOPLE FIRST